



GentleTouch® – eine einfache und sichere Kopflagerung in der Bauchlage.

- Reduziert den Druck auf die Augen
- Hygienisches Einmalprodukt
- Optimale Druckverteilung
- Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden
- Latexfrei
- Erhältlich in 3 Größen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	ca. Maße in cm	Inhalt VE
1937DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß, rechter Intubationsausgang	24 x 26 x 18	12 Stück
1941DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß, linker Intubationsausgang	24 x 26 x 18	12 Stück
1937SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel, rechter Intubationsausgang	24 x 26 x 13	12 Stück
1941SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel, linker Intubationsausgang	24 x 26 x 13	12 Stück
1948DZ	GentleTouch® Kopfpolster klein, rechter Intubationsausgang	20,5 x 18 x 9,5	12 Stück

Material

Hygienisches Einmalprodukt bestehend aus stabilem blauen Schaumstoff (Supportethane™) und einer weißen, weichen Schaumstoffschicht (Contourethane™) für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.

Anwendungshinweis

GentleTouch® Kopfpolster ist für den Gebrauch bei nur einem Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung bestimmt.

Dieses Produkt ist vakuumverpackt um Versand- und Lagerplatz zu sparen.

Nach dem Öffnen warten Sie mind. 20 Minuten, damit das GentleTouch® Kopfpolster seine Gebrauchsform annehmen kann.

Während der Lagerung sollte in regelmäßigen Intervallen die richtige Positionierung nicht nur kontrolliert werden, sondern auch durch minimales Anheben des Kopfes eine kurzzeitige Wiederherstellung der Mikrozirkulation ermöglicht werden.